

Maria
clean nose

NOSIES ASPIRATORIUS su baterijomis

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

- ✔ Atsparus vandeniui, galima plauti
- ✔ Tylus
- ✔ Lengvai plaunama gleivių surinkimo talpykla
- ✔ Ergonominis dizainas leidžia patogiai laikyti ir kontroliuoti
- ✔ Statomas vertikaliai
- ✔ 2 dydžių antgaliai
- ✔ Veikia su 2 AA tipo baterijomis (komplekte nėra elementų)

PASKIRTIS: greitai ir švelniai šalina gleives esant viršutinių kvėpavimo takų uždegimui

⚠ ĮSPĖJIMAI

Prieš pradėdami naudoti prietaisą prašome perskaityti naudojimo instrukciją. Išsaugokite šią naudojimo instrukciją.

1. Neleisti vaikams žaisti su šiuo prietaisu, nes tai nėra žaislas. Saugoti prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad būtų išvengta smulkių detalių ir dalių praradimo rizikos.
2. Šis prietaisas skirtas užgultai nosiai valyti, nenaudoti jo vaikų burnai arba ausims.
3. Prieš naudojant išplauti prietaisą, jeigu sukauptos gleivės viršija ant talpyklos nurodytą maksimaliai leistiną ribą (maždaug 4 ml). Visada valykite ir džiovinkite prietaisą prieš ir po kiekvieno naudojimo. Žiūrėti skyrių „Valymo rekomendacijos“.
4. Nekišti silikoninio antgalio per giliai į šnerve.
5. Nenaudoti prietaiso ilgą laiką kūdikiams. Pakanka kelių sekundžių.
6. Nenaudoti šio prietaiso, jeigu yra žaizdų, uždegimo simptomų arba kraujuoja nosis.
7. Šis prietaisas skirtas tik asmeniniam naudojimui.
8. Silikoninis antgalis nuimamas.
9. Neleidžiama prietaiso modifikuoti, nemėginti išardyti prietaiso, nesilaikant šioje naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų.
10. Keisti baterijas, kai traukos jėga silpnėja naudojimo metu.
11. Darbo ciklas: 30 sekundžių įjungta/2 minutės išjungta.
12. Prietaiso numatyta naudojimo trukmė yra treji metai normaliomis naudojimo sąlygomis.
13. Numatomas prietaiso naudojimo laikas yra treji metai, naudojant įprastomis sąlygomis.

⚠ ĮSPĖJIMAS DĖL BATERIJŲ


1. Naudoti tik šarmines baterijas.
2. Rekomenduojama naudoti tokias pat arba ekvivalentines baterijas.
3. Nenaudoti kartu šarminių, standartinių (anglies-cinko) arba pakartotinai įkraunamų (nykčio-kadmio) baterijų.
4. Nenaudoti senų ir naujų baterijų kartu.
5. Baterijas dėti atsivėlgiant į poliųs.
6. Tuščias baterijas būtina išimti iš prietaiso.
7. Prieš dedant baterijas įsitikinti, kad visi kontaktuojantys paviršiai yra švarūs.
8. Išimti baterijas, jeigu prietaisas nebus naudojamas ilgą laiką; baterijas lengva išimti.
9. Išimkite baterijas jei neplanuojate prietaiso naudoti ilgą laiką. Jas patogiai išimsite per akumulatoriaus skyriaus skylės.



Į KOMPLEKTĄ ĮEINA:

- ① Pagrindinis korpusas;
- ② Dviejų skirtingų dydžių silikoniniai antgaliai (suaugusiesiems ir vaikams);
- ③ Viena naudojimo instrukcija;
- ④ Du atsarginiai silikoniniai žiedai

SUDEDAMŲJŲ DALIŲ APRAŠYMAS

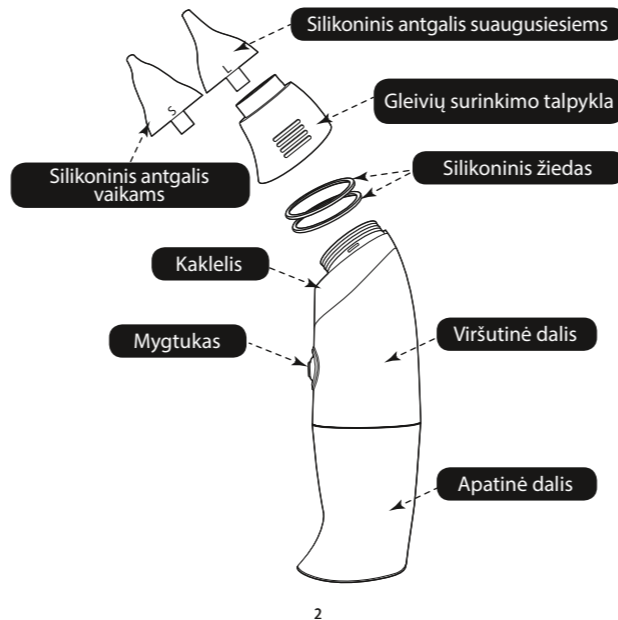

| Nuorodos ir gamintojo deklaracija – elektromagnetinė emisija | | |
|--|-------------|---|
| Emisija | Atitiktis | Elektromagnetinė aplinka – nurodymai |
| RF emissions CISPR 11 | Pirma grupė | ME8202X naudoja RF energiją tik vidinei veiklai. Be to, RF emisija yra labai maža ir mažai tikėtina, kad ji gali veikti šalia esančius prietaisus. |
| RF emissions CISPR 11 | B klasė | ME8202X skirtas naudoti visose įstaigose, taip pat skirtas naudoti namuose, taip pat įstaigose, kurios tiesiogiai sujungtos su viešai naudojamų žemo voltažo elektros tinklu, per kurį tiekiama elektra namams. |
| Darnioji emisija IEC 61000-3-2 | Netaikoma | |
| Volčių keitimas / keitimo emisija IEC 61000-3-3 | Netaikoma | |

| Nuorodos ir gamintojo deklaracija – elektromagnetinis imunitetas | | | |
|--|---|-----------------------------|---|
| ME8202X skirtas naudoti toliau nurodytoje elektromagnetinėje aplinkoje. ME8202X pirkėjas arba naudotojas turi užtikrinti naudojimą atitinkančią aplinką. | | | |
| Imuniteto bandymai | EN 60601 bandymų lygis | Atitiktis (lygis) | Elektromagnetinė aplinka – nuorodos |
| Elektrostatinė iškrova (ESD) IEC 61000-4-2 | ±6 kV kontakte ±8 kV ore | ±6 kV kontakte ±8 kV ore | Grindys turi būti medinės, betoninės arba klotos keraminėmis plytelėmis. Jeigu grindys klotos sintetine danga, santykinė drėgmė turi siekti bent 30%. |
| Elektros jungtis / sprogamumas IEC 61000-4-4 | ±2 kV maitinimo linijose | Netaikoma | Netaikoma |
| Tiekimas IEC 61000-4-5 | ±1 kV linija (-os) prie linijos ±2 kV linija (-os) prie žemės | Netaikoma | Netaikoma |
| Įtampos sumažėjimas, trumpos pertraukos ir įtampos kaita elektros tiekimo linijose IEC 61000-4-11 | <5% Ur (>95% sumažėjimas Ur) 0,5 ciklo 40% Ur (60% sumažėjimas Ur) 5 ciklams 70% Ur (30% sumažėjimas Ur) 25 ciklams <5% Ur (>95% sumažėjimas Ur) 5 s | Netaikoma | Netaikoma |
| Galios dažnis (50/60 Hz) magnetinis laukas IEC 61000-4-8 | 3 A/m | 3 A/m | Jeigu yra vaizdo sutrikimų gali pririekti ME8202X perkelti vaizdo skaiščio stiprintuvą toliau nuo galios dažnio magnetinio lauko šaltinių. Magnetinį lauką būtina nustatyti numatomoje naudojimo vietoje, kad būtų užtikrinta, jog jis būtų pakankamai žemas. |

| Nuorodos ir gamintojo deklaracija – elektromagnetinis imunitetas | | | |
|---|------------------------------|-------------------|--|
| ME8202X skirtas naudoti toliau nurodytoje elektromagnetinėje aplinkoje. ME8202X pirkėjas arba naudotojas turi užtikrinti naudojimą atitinkančią aplinką. | | | |
| Imuniteto bandymai | EN 60601 bandymų lygis | Atitiktis (lygis) | Elektromagnetinė aplinka – nuorodos |
| Valdiklis RF IEC 61000-4-6 | 3 Vrms 150 kHz iki 80 MHz | Netaikoma | Portatyvinius ir mobiliuosius RF komunikacijų prietaisus naudoja ne arčiau už nurodytą atstumą nuo ME8202X prietaiso, taip pat laidų; skaičiavimai atlikti priimant siųstuvo dažnį. |
| Siųstuvas RF IEC 61000-4-3 | 3 V/m 80 MHz iki 2,5 GHz | 3 V/m | Rekomenduojamas atstumas $d = 1.2 \sqrt{P}$ $d = 1.2 \sqrt{P}$ 80 MHz to 800 MHz $d = 2.3 \sqrt{P}$ 800 MHz to 2.5 GHz Kur P – tai siųstuvo didžiausia išvesties galia vatais (W) pagal siųstuvo gamintojo specifikacijas ir d – rekomenduojamas atstumas metrais (m). Lauko jėga nuo mišrių RF siųstuvų, taip tai nustatyta elektromagnetinių vietų tyrime, turi būti mažiau už atitikties lygį kiekviename dažnio diapazone. Elektromagnetiniai trukdžiai gali įvykti esant arti nuo prietaisų, kurie paženklinti tokiais ženklais |
| Pirma pastaba: 80 MHz ir 800 MHz dažnių diapazone naudojamas aukščiausias rodmuo. Antra pastaba: šiuos pagrindinius nustatymus negalima taikyti visomis situacijomis. Elektromagnetinių bangų plitimui įtakos turi absorbcija ir atspindėjimas nuo konstrukcijų, objektų ir žmonių. A. Fiksuotų siųstuvų, tokių kaip radijo telefonų bazų stotys (korinio ryšio / belaidės) ir antžeminiai mobilieji radijo aparatai, savadarbiai radijo aparatai, AM ir FM radijo siųstuvai ir TV siųstuvai, laiko stiprumo neįmanoma numatyti tiksliai. Siekiant įvertinti elektromagnetinę aplinką, kuriai turi įtakos RF siųstuvai, reikia atlikti elektromagnetinės aplinkos tyrimą. Jeigu išmatuoto lauko intensyvumas buvimo vietoje, kurioje naudojamas ME8202X prietaisas, viršija atitinkamą RF atitikties lygį, būtina stebėti, kad ME8202X veiktų tinkamai. Jeigu pastebima veiklos sutrikimų, gali pririekti papildomų veiksmų, pavyzdžiui, perorientuoti arba perkelti prietaisą. | | | |



TAIKOMI STANDARTAI:

Šis prietaisas atitinka EB Direktyvą MDD (93/42/EEB).
Prietaiso kūrimo ir naudojimo metu buvo taikomi šie standartai:

- IEC / EN 60601-1 Medical electrical equipment – Part 1: General requirements for basic safety and essential performance
- IEC / EN 60601-1-2 Medical electrical equipment – Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance – Collateral standart: Electromagnetic compatibility – Requirements and tests
- IEC/EN 60601-1-6 Medical Electrical Equipment – Part 1-6: General Requirements for Safety – Collateral Standard: Usability
- IEC 60601-11 Medical electrical equipment – Part 1-11: General requirements for basic safety and essential performance – Collateral standart: Requirements for medical electrical equipment and medical electrical systems used in the home healthcare environment
- EN ISO 10993-5 Biological evaluation of medical devices – Part 5: Tests for in vitro cytotoxicity
- EN ISO 10993-10 Biological evaluation of medical devices – Part 10: Tests for irritation and delayed-typed hypersensitivity

2016
GAMINTOJAS
Asia Connection Co., Ltd.
16F-1, No. 16 Jian Ba Road,
Chung Ho District, New Taipei City,
Taiwan 23511
www.asiaconnection.com.tw



ELEKTROS IR
ELEKTRONINIŲ
PRIETAISŲ ATLIKIOS
(WEEE)



PARTIJOS KODAS
ŽIŪRĖTI ETIKETĖ PRIETAISO
APATINĖJE DALYJE



ŽIŪRĖTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ



Naudojamos BF dalys



Apsauga nuo kietųjų dalelių, kurių
skersmuo viršija 12,5 mm ir apsauga
nuo vertikaliai krentančių vandens
lašų pasukus korpusą iki 15°.

Platinojas: **ELVIM LTD.**
Kurzemes pr. 3G,
Ryga, Latvija, LV-1067
LV tel.: + 37167808440
www.marialine.lv
LT tel.: + 37052498854
www.marialine.lt
EE tel.: + 3725076410
www.marialine.ee



MCN8 vers. Nr. 0706209

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



Atskirti viršutinę dalį nuo apatinės, patraukus tiesiai į apačią. Netaikyti fizinės jėgos.

Įdėti dvi 1,5 AA tipo šarmines baterijas, atsižvelgus į polius, kaip parodyta piešinyje.

Patikrinti, kad silikoniniai žiedai būtų įstatyti tiksliai į griovelius. Uždaryti korpusą.


4 Pasirinkti silikoninį antgalį pagal lignonio šnervės dydį.

5 Įsitikinti, kad silikoninis antgalis tvirtai pritvirtintas prie gleivių talpyklos.

6 Atsargiai įvesti silikoninį antgalį į lignonio šnerve. Nekišti per giliai.

7 Nuspausti mygtuką ir palaikyti kelias sekundes, kad būtų išsiurbtas sekretas. Nustoti spaudus mygtuką, kai siurbimas pabaigtas ir prietaisas pats išsijungs.

⚠ Jeigu surinktų gleivių kiekis beveik viršija gleivių surinkimo talpyklos maksimalų saugos lygį, žiūrėti rekomendacijas skyriuje „Valymo rekomendacijos“ prietaiso valymui. Nenaudoti prietaiso, jeigu sukauptų gleivių lygis beveik viršija tiekimo kanalą (žr. priešinį iš dešinės).

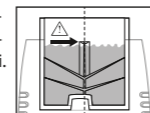

VALYMO NUORODOS


1 Įsitikinti, kad prietaisas prieš valymą yra tvirtai uždarytas.

2 Nuimti silikoninį antgalį.


3 Paimti gleivių talpyklą tarp nykščio ir smiliaus.

4 Lengvai palenkti gleivių surinkimo talpyklą žemyn, kad nuimtumėte ją nuo kaklelio.


5 Nuimti silikoninius žiedus nuo kaklelio ir nuvalyti juos po kelių naudojimo kartų. Silikoninius žiedus nebūtina valyti po kiekvieno naudojimo karto.

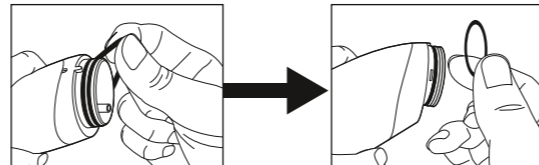

6 Dalis kruopščiai nuplaukite švari vandeniu ir muilu. Nuplaukite apykaklę. Išdžiovinkite dalis prieš pakartotinai naudojant.

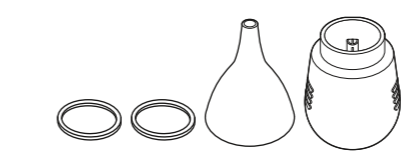

7 Surinkite visas dalis kaip parodyta.

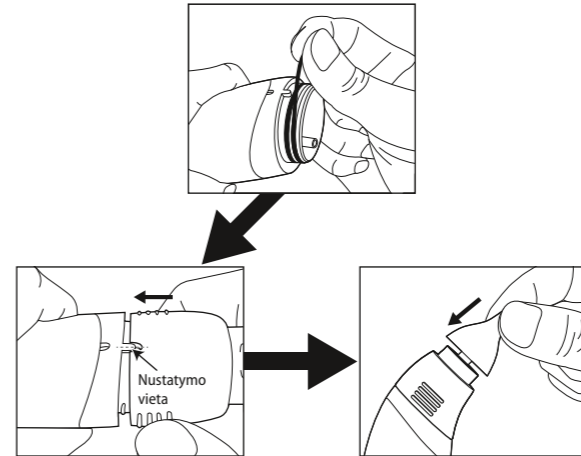

* tinkamai sureguliuokite gleivinės taurės pozicionavimo angą.

8 Patikrinkite kad visos dalys būtų sujungtos teisingai ant prietaiso.

Jeigu sukauptų gleivių kiekis viršija gleivių surinkimo talpyklos saugos lygį prietaiso naudojimo metu, jeigu pastebima, kad gleivės teka nuo oro vožtuvo kaklelio galinėje dalyje, žiūrėti toliau esančias rekomendacijas:

1 Įsitikinti, kad prietaisas prieš valymą yra tvirtai uždarytas.

2 Nuimti silikoninį antgalį ir gleivių surinkimo talpyklą.



3 Panardinti kaklelį į švarų vandenį, kaip parodyta piešinyje. Nuspausti ir laikyti mygtuką 15 sekundžių, kad būtų nuvalytas vidinis siurbtukas.

4 Vanduo įteka ir išteka iš vidinio siurbtuko, kaip parodyta piešinyje.

5 Pakeisti vandenį ir pakartoti trečią žingsnį, jeigu reikia.

6 Po valymo ištraukti prietaisą iš vandens. Toliau spausti mygtuką ir laikyti jį apie 30 sekundžių, kol vidinis siurbtukas išdžius.

7 Išdžiovinti kaklelį ir surinkti visas prietaiso dalis.

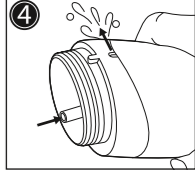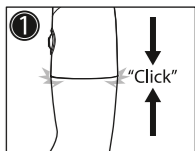

INFORMACIJA APIE VEIKIMĄ, LAIKYMO SĄLYGAS IR TRANSPORTAVIMĄ

| | |
|------------------------|--|
| Darbo aplinka | Temperatūra: +5 ~ 40°C Drėgnumas: 15% ~ 93% Oro slėgis: 700 ~ 1060 hPa |
| Laikymas ir saugojimas | Temperatūra: -10 ~ 50°C Drėgnumas: ≤93% Oro slėgis: 700 ~ 1060 hPa |